



LAPSE MONITORI BE1491 PILTJUHEND

Monitor ja lisavõimalused

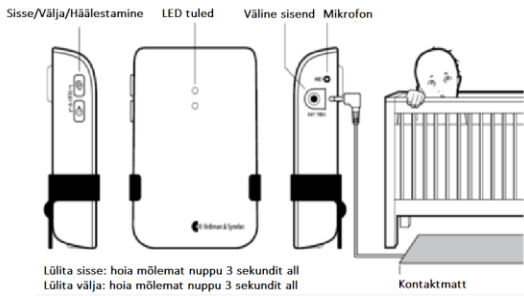

Lapse monitor on üks osa Bellmani alarmitoodetest, mis aitab vaegkuuljal või kurdil saada teada, millal laps nutab või on voodist maha kukkunud. Monitor on saatja, mis saadab häire vastuvõtjale. Häire käivitab vastuvõtja valguse vilkumise, vibreerimise või heliga - olenevalt kasutatavast vastuvõtjast.


Monitori paigaldamine

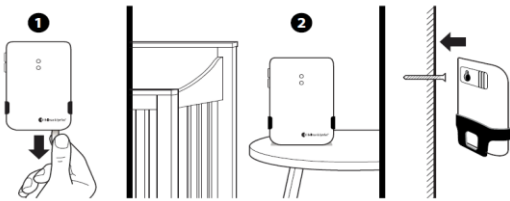

Monitori ülesseadmine on lihtne:

1. Tõmba välja patareide kaitselint.
2. Aseta monitor voodi lähedal olevale lauale või kinnita seinal, voodist 0,5÷1 m kaugusele. Vaata pilte 1 ja 2.


Monitor kontaktmatiga

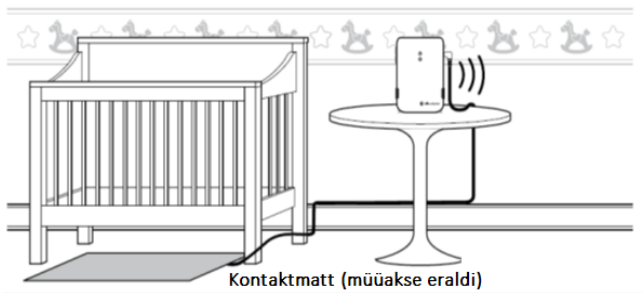

Aseta kontaktmatt voodi ette ja ühenda monitoriga. Sa saad kohe teada, millal laps on voodist väljunud. Kontaktmatt on eraldi müügil.

Monitori reguleerimine


	Tundlikkus	
	Punane LED	Kõrge
	Oranž LED	Keskmine
	Roheline LED	Madal
	Viivitus	
	Punane LED	30 s
	Oranž LED	10 s
	Roheline LED	1 s

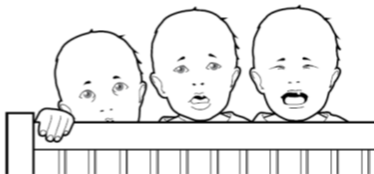

Vajutades monitori vasakul pool asuvatele nuppudele, saate teada monitori tundlikkuse ja viivituse sätteid.

- tundlikkust on vaja suurendada, kui laps nutab, aga monitor ei anna häiret;
- tundlikkust on vaja vähendada, kui laps ei nuta, aga monitor annab häiret;
- viivitust on vaja reguleerida kui monitor reguleerib liiga kiiresti või aeglaselt.

Monitori signaali vastuvõtjad

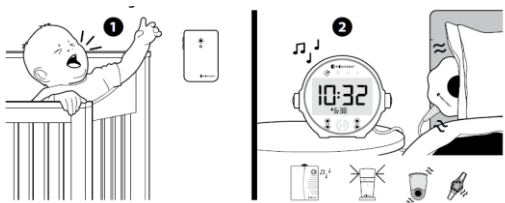

Lapse nutuhäire vastuvõtuks on mitmeid võimalusi:

1. Äratuskell vibropadjaga. Häire korral äratuskell vilgub eredalt ja heliseb, kellaga ühendatud vibropadi vibreerib.
2. Kantav patareidega vilkur vilgub, heliseb ja temaga ühendatud vibropadi vibreerib.
3. Akudega vilkur vilgub eredalt ja temaga ühendatud vibropadi vibreerib.
4. Kandmisel kantavad randme- ja vöövastuvõtjad vibreerivad ja öisel puhkeajal nende laadimisel laadijatega ühendatud vibropadjad vibreerivad.

Täiendav ingliskeelne tehniline info vt. originaaljuhendi lk. 84 ÷ 92.