

# Kommunikaatori MINO lühikasutusjuhend

MINO on profiaparaat sulle kõne ja muusika edastamiseks võimendatult läbi kõrvaklappide, individuaalse silmusvõimendi või kasutamiseks ruumides, kuhu on paigaldatud töötav induktiivne silmusvõimendus.

## KASUTAMINE

### AKU LAADIMINE (aku tuleb enne esmakordset kasutusele võtmist täislaadida)

- Aseta võrgupistik laadija pesasse.
- Ühenda MINO laadijaga – selleks on karbis vajalik laadimisjuhe.
- Laadimisaeg 2,5 tundi. Tööaeg täislaetud akuga on 18 tundi.
- Aku vajab laadimist, kui MINO ülemise ümmarguse nupu kohal vilgub roheline tuli või kui põleb sama kohas oranž tuli.

### MINO saab kasutada kõikjal (ka mürrarikastes kohtades): kodus, tööl, poes, teatris või õues olles.

- Torka kõrvaklappide pistik (ø3,5mm) MINO korpuse paremal küljel asuvasse kõige suuremasse keskmisesse pistikupessa.
- MINO sisselülitamiseks vajuta väiksemale ümmargusele nupule (asub kahe kandilise nupu vahel), süttib roheline tuli väikse ümmarguse nupu kohal.

#### Helitugevuse reguleerimine

- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „+“ märgile vajutades helitugevus suureneb.
- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „-“ märgile vajutades helitugevus väheneb.

#### Tämbri reguleerimine

- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „<“ märgile vajutades suurendatakse tämbri basse.
- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „>“ märgile vajutades suurendatakse tämbri kõrgeid toone.

### MINO kaasaskandmine – selleks on kaks turvalist võimalust:

- Kinnitage MINO tagaküljel oleva klambri taga riiete tasku või revääri külge.
- Kaelaskandmiseks kinnitage kaelapael vastavalt juhendiraanatu tagakaane sisekülje pildi järgi kinnitusklambri õnarustesse.

MINO võite asetada ka oma istekoha juures olevale töö-, teleri- või söögilauale.

### MINO mürrarikastes kohtades, kasutades heli kaugvõimendust - nagu õues, tänaval, autos, restoranis.

- Ühenda kõrvaklappide või individuaalse Bellmani silmusvõimendi /BE9159) pistik MINO korpuse paremal küljel asuvasse keskmisse kõige suuremasse pistikupessa.
- Olles mürrarikas kohas vajuta MINO ülemises reas vasakule kandilisele nupule, süttib mõneks sekundiks nupu kohal oranž tuli.
- Suuna MINO ülemine ots eemal oleva kõneleja suunas, vajadusel reguleeri ka heli tugevust ja tämbrit.
- MINO digitaalne heli kaugvõimendus vähendab teistest suundades tulevaid helisid, võimendades vaid vajaliku inimese juttu.

### MINO induktiivse silmusvõimendusega kohtades (Tartus Teatris Vanemuine ja Tallinna Linnateatris):

- Kohtades, kus toimib induktiivne silmusvõimendus kannu aparaati kaelapaelaga püstises asendis või aseta horisontaalselt lauale.
- MINO T-asendi sisselülitamiseks vajuta ülemises reas paremale kandilisele nupule, süttib mõneks sekundiks nupu kohal roheline tuli.
- MINO T-asendi väljalülitamiseks vajuta ülemises reas vasakule kandilisele nupule, süttib mõneks sekundiks nupu kohal roheline tuli.

### MINO väljalülitamiseks vajutage ülemisele ümmargusele nupule, kuni kustub tema kohal olev roheline tuli.

## OLULISED LISAVÕIMALUSED

### MINO kooskasutamine välitingimustes - Bellmani komplektiga Microset™ BE9129

- Torka Bellmani komplekti Microset™(BE9129) pistik MINO korpuse paremal küljel asuvasse kõige suuremasse keskmisesse pistikupessa.
- Kinnita Microset™ mikrofon klipiga suust umbes 30 cm allapoole riiete külge ja aseta sisekõrvaklapp kõrva.
- Reguleeri helitugevus parajaks ja aseta MINO turvalisse varjatud kohta nt. põue- või rinnataskusse.

### MINO kooskasutamine Bellmani silmusvõimendi BE9159/BE9161( ei kuulu komplekti) ja oma kuuldeaparaadiga, millel on T- asendisse lülitamise võimalus:

- Silmusvõimendi võimaldab MINO kasutada koos oma kuuldeaparaadiga, mobiil- ja tahveltelefoni, tahvel- ja sülearvutiga.
- Kinnitage MINO tema tagaküljel oleva klambri silmusvõimendi külge.
- Ühenda Bellmani silmusvõimendi /BE9161) pistik MINO korpuse paremal küljel asuvasse keskmisse kõige suuremasse ø3,5 mm pistikupessa või mobiil-, tahveltelefoni-, tahvel- ja sülearvuti ø3,5 mm pistikupesasse.
- Lülitada MINO T-asendisse, selleks vajuta tema ülemises reas paremale kandilisele nupule, süttib mõneks sekundiks parema kandilise nupu kohal roheline tuli.
- Lülitada oma kuuldeaparaat T-asendisse.
- MINO tagab nüüd Sinu kuuldeaparaadis olulise helikvaliteedi paranemise, olenemata kohast kus Sa viibid (näiteks teatris, kinos või tänaval olles, poes või tööl käies, kodus TV vaadates, raadiot kuulates jne.).
- JUHTMEVABA JA MUGAV, küsi lisainfot maaletoojalt!

**NB!** Täiendav erialane lisateave originaaljuhendi lisas – ainult inglise keeles

Maaletooja: Kadrimardi OÜ/Kaarel Saluste

Tel +372 5115 340

[ks@kadrimardi.ee](mailto:ks@kadrimardi.ee)

[www.kadrimardi.ee](http://www.kadrimardi.ee)

[www.bellman.com/en/for-professionals/product-support](http://www.bellman.com/en/for-professionals/product-support)

**Bellman**®  
audio  
FOR EASY COMMUNICATION™