

# Kommunikaatori Domino Classic lühikasutusjuhend

KOMMUNIKAATOR on juhtmevaba aparaat sulle kõne ja muusika edastamiseks võimendatult läbi kõrvaklappide või silmu- se kaudu kuuldeaparaati. Aparaat koosneb vastuvõtjast ja saatjast, töökaugusega teineteisest kuni **25 m** tubades ning kuni 100 m õues.

## KASUTAMINE

### AKUDE LAADIMINE

- Aseta võrgupistik laadija pesasse.
- Ühenda vastuvõtja ja saatja laadijaga – selleks on karbis vajalik laadimisjuhe.
- Laadimisaeg 2,5 tundi. Tööaeg täislaetud akudega on 8-12 tundi.
- Akud vajavad laadimist, kui saatja või vastuvõtja ülemistele ümmarguste nuppude kohal olevad rohelised või oranžid tuled vilguvad.

**VASTUVÕTJA** - kasutades üksinda vastuvõtjat kodus, tööl või poes olles. Vaata pilti valge juhendiraamatu lk. 331.

- Torka kõrvaklappide pistik vastuvõtja korpuse paremal küljel asuvasse ülemisse pistikupessa.
- Vastuvõtja sisselülitamiseks vajuta väiksemale ümmargusele nupule (asub kahe kandilise nupu vahel), süttib roheline tuli väikse ümmarguse nupu kohal.

#### Helitugevuse reguleerimine

- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „+“ märgile vajutades helitugevus suureneb.
- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „-“ märgile vajutades helitugevus väheneb.

#### Tämbri reguleerimine

- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „<“ märgile vajutades suurendatakse tämbri basse.
- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „>“ märgile vajutades suurendatakse tämbri kõrgeid toone.

**Vastuvõtja mugavalt saatjaga** - ilma tülikate juhtmeteta. Vaata pilte valge juhendiraamatu lk. 328, 329, 330, 332, 333 ja 335.

- Saatja sisselülitamiseks vajuta tema keskel asuvale suuremale ümmargusele nupule, süttib nupu kohal olev roheline tuli.
- Vastuvõtjaga saatja kuulamiseks vajuta vastuvõtja parempoolsele kandilisele nupule, millel on kiri **RF**, korra süttib nupu kohal olev roheline tuli.
- Saatja mikrofoni väljalülitamiseks tuleb vajutada vastuvõtja vasakpoolsele nupule, millel on kiri **MIC**, korra süttib nupu kohal olev roheline tuli.

**Vastuvõtja koos silmusvõimendiga** - kasutatakse kodus, tööl või poes olles. Vaata pilti valge juhendiraamatu lk 334.

- Ostes endale silmusvõimendi, saate vastuvõtjat kasutada koos oma kuuldeaparaadiga.
- Torka silmusvõimendi pistik vastuvõtja korpuse paremal küljel asuvasse ülemisse pistikupessa.
- Vastuvõtja sisselülitamiseks vajuta väiksemale ümmargusele nupule (asub kahe kandilise nupu vahel), süttib roheline tuli väikse ümmarguse nupu kohal.
- Lülitaga oma kuuldeaparaat asndisse **T**.

**Saatja ja vastuvõtja väljalülitamiseks vajutage nende ülemistele ümmargustele nuppudele, kuni kustuvad nende kohal olevad rohelised tuled.**

**Saatja ja vastuvõtja kaasaskandmine** – selleks on kolm turvalist võimalust:

- Kinnitage vastuvõtja ja saatja tagaküljel oleva klambri nad riide taskute või revääride külge.
- Kaelaskandmiseks kinnitaga kaelapael vastavalt juhendiraamatu tagakaane pildi järgi kinnitusklambri õnarustesse.
- Saatja võite asetada ka töö-, teleri- või söögilauale - vaata pilte valge juhendiraamatu lk. 328, 329, 330, 332, 333 ja 335.

**NB!** Täiendav erialane lisateave originaaljuhendi lisan – ainult inglise keeles

Maaletooja:



Kadrimardi OÜ

Mobiil/ Cell phone/Моб: +372 5115340

[ks@kadrimardi.ee](mailto:ks@kadrimardi.ee)

[www.kadrimardi.ee](http://www.kadrimardi.ee)

**Bellman<sup>®</sup>audio**  
FOR EASY COMMUNICATION™