


BELLMANI ÄRATUSKELLA BE1370-PRO ja BE1580-VISIT KASUTUSJUHEND

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БУДИЛЬНИКА BE1370 PRO и BE1580 VISIT


1 ÄRATUSKELLA ÜHENDAMINE ELEKTRIVÕRGU- ja VIBROPADJAGA *) подключение будильника к сети и виброподушкой *)

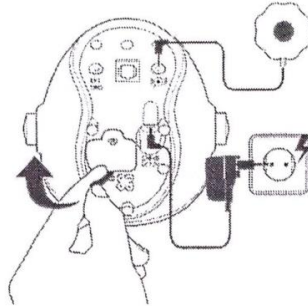


*) Bellmani turvaseadmed (ei ole komplektis) - akna ja ukse magnetkontaktid, jalamatt ja mobiiliandur (ei ole komplektis) ühendatakse välise sisendiga (EXT TRIG) või lauatelefon äratuskella telefonisisendisse.

*) Оборудование безопасности Беллмана /оконные и дверные магнитные контакты, дверной коврик/ и мобильный датчик (не входят в комплект будильника - заказывается отдельно) подключается на внешний вход триггера (EXT TRIG) и настольный телефон на вход телефонной розетки.

2 ÄRATUSKELLA ÕIGEKS PANEK настройка времени

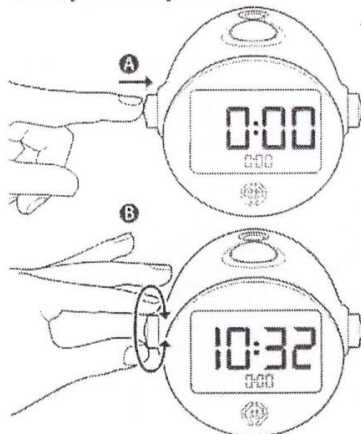


3 ÄRATUSE PEALEPANEK настройка пробуждения

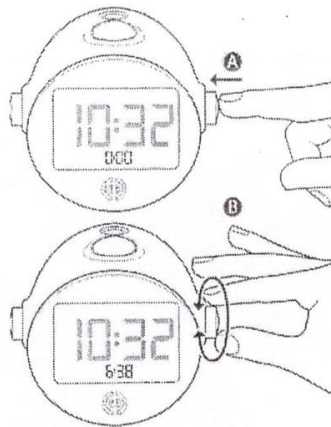


4 ÄRATUSE SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE включение/отключение пробуждения



5 KORDUVÄRATUSE SISSELÜLITAMINE включение повторного пробуждения

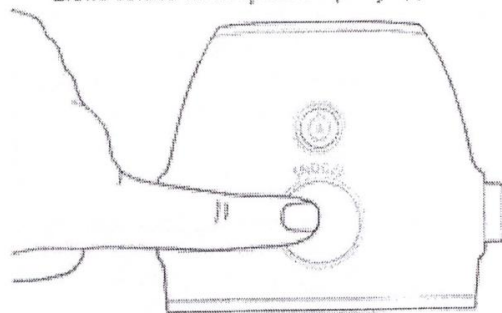


6 TAUSTVALGUS SISSE-VÄLJA включение/отключение подсветки

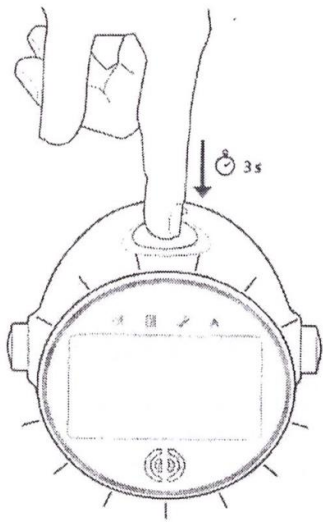

7 LISASEADED VÕIMALDAVAD дополнительные настройки

настройка
подсветки
дисплея


формат
времени

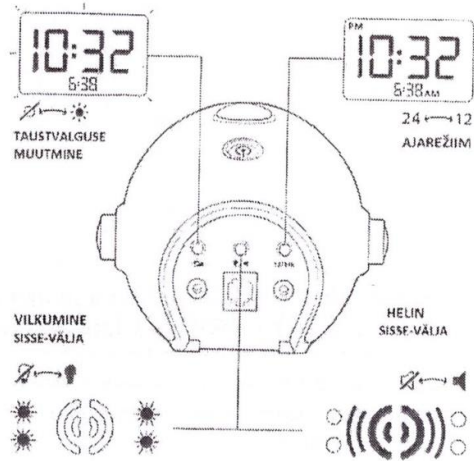

настройка
мелькания

настройка
звука

8 AINULT ÄRATUSKELLAL BE1580 VISIT / только для будильника BE1580 VISIT

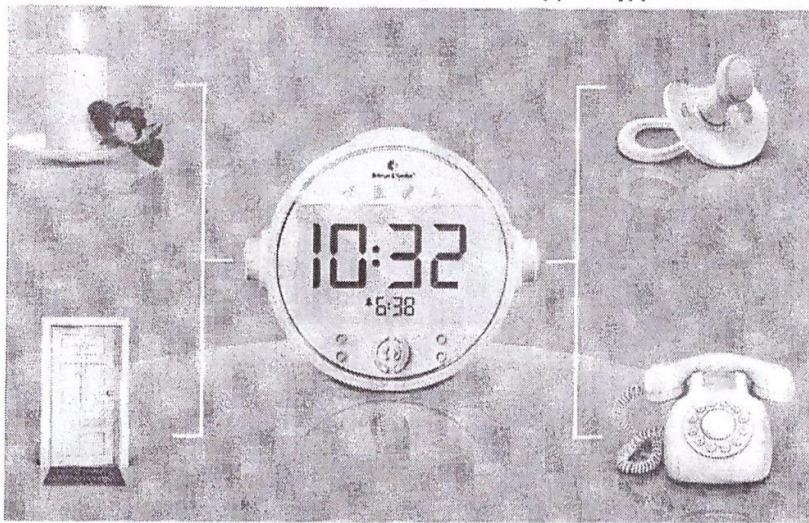

- Äratuskell-vastuvõtjas BE1580's on ühendatud äratuskell ja vastuvõtja, mis kuuluvad Bellman Visit 868 süsteemi ja on mõeldud sise-tingimustes juhtmevabaks kasutamiseks, kaugusega kuni 200m.
- Äratuskella heli- ja valgussignaalid käivitatakse Bellman Visit süsteemi kuuluvate saatjate /suitsuandur, uksekell, lapsenutt, multisaatja/ raadiosignaalide kaudu.
- Täpsem info Bellman Visit 868 süsteemi saatjate kasutusjuhenditest.

-
- Будильник - приемник BE1580, который принадлежит к системе Беллман Визит 868 и предназначен для комнатных условиях беспроводного использования на расстоянии до 200 м.
 - Звуковые и световые сигналы тревоги будильник - приемника BE1580 будут запущен радиосигналами в системе Беллмана от датчиков дыма, дверного звонка, плач ребенка и многоцелевого передатчика.
 - Подробную информацию смотрите в инструкциях по эксплуатации передатчиков системы Беллмана Визит 868.