


MULTIMONITOR-SAATJA BE1431 PILTJUHEND

1. Monitori ühendamine käivitajate - lisaseadmetega:

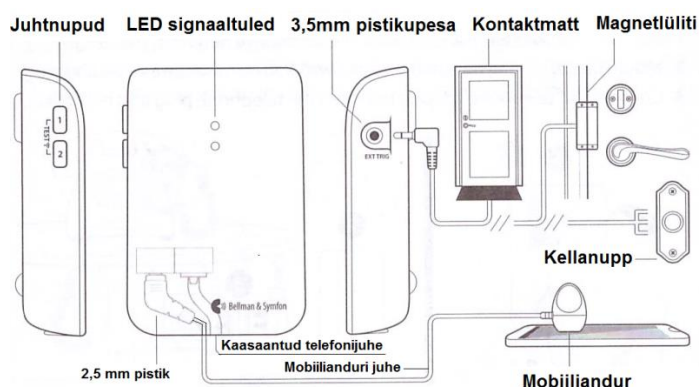


Multimonitor-saatja on üks osa Bellman & Symfon (Rootsi) alarmitoodetest, mis aitavad vaegkuuljal või kurdil märgata signaale nende kodus samuti tööl olles. Signaali allikateks on:

- lauatelefon,
- mobiiliandur või tahvelarvuti,
- kellanupp või fonolukk,
- kontaktmatt,
- magnetlüliti,
- tuletõrje häiresüsteem,


Multimonitor-saatja tunneb ära temaga ühendatud signaali allikad ja käivitab vastuvõtjad valguse vilkumise, vibreerimise, heli või üheaegselt valguse vilkumise ja heliga olenevalt kasutatavast vastuvõtjast

2. Monitori paigaldamine ja ühendamine lauatelefoniga:

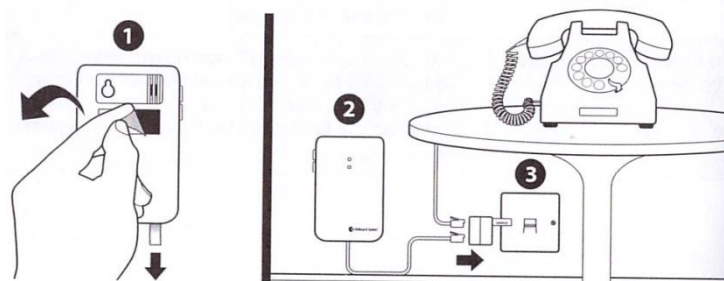

1. Tõmba välja patareide kaitselint, puhasta sein niiske lapiga ja eemalda kleepriba kaitsekile,
2. Pakendis on suurimisjuhis, kinnitamaks kruvi ja tüübel,
3. Multimonitor-saatja ühendamine lauatelefoniga:
 - komplekti telefonijuhe on ühendatud saatjaga,
 - sama telefonijuhe ühenda komplekti harupistikuga,
 - oma lauatelefonijuhe ühenda komplekti harupistikuga,
 - harupistik ühenda Teie telefonivõrgu seinapistikupesaga.

3. Monitori korrasoleku kontrollimine lauatelefonile helistamisel:

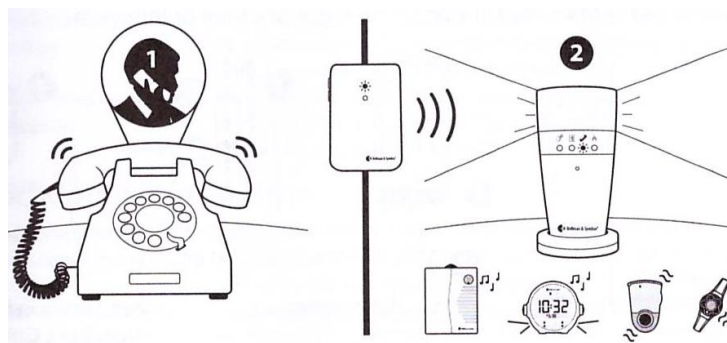

1. Palu kedagi helistada Teie lauatelefonile,
2. Kui lauatelefon heliseb, hakkavad kutsungi vastuvõtjad:
 - äratuskell vilgub eredalt ja heliseb, kellaga ühendatud vibropadi vibreerib,
 - kantav patareidega vilkur vilgub, heliseb ja temaga ühendatud vibropadi vibreerib,
 - akudega vilkur vilgub eredalt ja temaga ühendatud vibropadi vibreerib,
 - kandmisel kantavad randme- ja vöövastuvõtjad vibreerivad ja öisel puhkeajal nende laadimisel laadijatega ühendatud vibropadjad vibreerivad

4. Monitori korrasoleku kontrollimine mobiilianduri, tahvelarvuti, kellanupu, fonoluku, kontaktmatti, magnetlüliti või tuletõrje häiresüsteemiga:

- Vajuta üheaegselt mõlemale juhtnupule, peale nuppude vabastamist sütib korraks ülemine LED ja käivituvad allpool nimetatud vastuvõtjad. Vastuvõtjatel sütivad saatjat kujutavad LED'id (telefoni kujutis), heliga vastuvõtjatel lisandub telefonihelin.
- Ühenda monitoriga Sulle vajalik lisaseade, näiteks aseta **mobiiliandur** mobiilile. Helista mobiilile või saada sõnum. Vastuvõtjatel sütivad saatjat kujutavad LED'id (telefoni kujutis), heliga vastuvõtjatel lisandub telefonihelin.
- Monitori saab kasutada järgmiste Bellman & Symfon AB toodetud vastuvõtjatega:
 - **Äratuskell** vibropadjaga, kutsungi korral äratuskell vilgub eredalt ja heliseb, kellaga ühendatud vibropadi vibreerib,
 - **Kantav patareidega vilkur** vilgub, heliseb ja temaga ühendatud vibropadi vibreerib,
 - **Akudega vilkur** vilgub eredalt ja temaga ühendatud vibropadi vibreerib,
 - **Kandmisel kantavad randme- ja vöövastuvõtjad** vibreerivad ja öisel puhkeajal nende laadimisel laadijatega ühendatud vibropadjad vibreerivad

Täiendav ingliskeelne tehniline info vt. originaaljuhendi lk. 51 ÷ 67.